



Fotografía no contractual

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: líquido
Color: incoloro
pH puro: aprox. 1.0
pH a 0.3%: 2.0
pH a 1%: 1.7
pH a 3%: 1.3
Densidad: 1.29
Caducidad: 4 años
Consérvese después de apertura: 6 meses

PROPIEDADES

Detergente
Neutralizante
Pasivante
No espumoso

PRESENTACIONES

Caja 6 x 5 L ref. 21031730
Bidón de 20 L ref. 21031722

COMPONENTES

Ácido fosfórico

PHOSPHAX

NEUTRALIZANTE ÁCIDO
PARA LAVADORAS DESINFECTADORAS DE LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

> VENTAJAS Y CUALIDADES

PHOSPHAX es un excelente neutralizante para los instrumentos quirúrgicos.

Acción desincrustante: su formulación es particularmente estudiada para disolver todas las manchas de sales de calcio, de otros sales minerales y de compuestos alcalinos, hasta en presencia de agua dura.

Acción neutralizante: neutraliza las superficies ionizadas en metal. Rompe las espumas residuales de los detergentes utilizados en la fase de limpieza y facilita la descontaminación de las lavadoras.

> APLICACIONES

Dominio de aplicación: se puede utilizar el **PHOSPHAX** en hospitales y en particular en quirófanos para las lavadoras-desinfectadoras para instrumentos quirúrgicos.

Compatibilidad: - **PHOSPHAX** es compatible con la mayoría de los materiales : acero inoxidable, neopreno, polipropileno, PEHD, PVC y vitón (ver *COR010317*).

Evitar el contacto con el cobre y el latón.

- **PHOSPHAX** está autorizado para el tratamiento de los utensilios en contacto con la alimentación (ver *Alim317*).

PHOSPHAX puede también ser utilizado en quirófano, en endoscopia, en los laboratorios de investigación y las industrias farmacéuticas y cosméticas.

> INSTRUCCIONES DE USO

Concentración recomendada: 0.3%
Temperatura: 40 a 60°C
Tiempo de contacto: 2 a 4 minutos

Protocolo:

Sumergir la bomba de caña en el líquido.
Coloque el bidón en el rack de la lavadora o cercano a ella.
Programa la fase de enjuague adaptada y inicie el ciclo de limpieza.
Una vez secados, los instrumentos están listos para la esterilización.

El protocolo de uso (PR 052B-1) está disponible a petición.

> PRECAUCIONES DE USO

Seguridad: C-Corrosivo

Ver Hoja de Datos de Seguridad HDS210317

Usar guantes y lentes de protección. Provoca quemaduras.

No inhalar los vapores.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y consultar a un especialista.

En caso de accidente o de malestar, consultar inmediatamente a un médico (si posible, mostrarle la etiqueta).

Almacenaje: Almacenar el bidón cerrado a una temperatura superior a 3 °C.

No mezclar con otros productos, menos con hipocloritos.

Eliminación: Consultar la reglamentación local y nacional en vigor.

FBLAB S.A. de C.V.

Paz Montes de Oca, 82-1, Churubusco Coyoacán, México D. F. 04120
Tel : (+52) (55) 15 51 08 - Cel.: (+521) (55) 35 73 29 23
info@franklab.mx - www.franklab.mx



Ficha Técnica

052B-1

10.2013
7622-0014-5001